



Information sur le produit/ service

DESINFECTANT DIALOX 5 Litres



schülke -†

Année 2023

Houque 31310 MONTESQUIEU VOLVESTRE

Tel: 06.69.19.22.07 Fax: 05.61.90.31.88

Mail: contact@danferr-medical.fr

Site: www.danferr-medical.fr



DESINFECTANT AU DIALOX 5

Produit

- Désinfectant DIALOX

Conditionnement

- Carton de 4 bidons de 5 Litres

Applications et Domaine

- Désinfectant et détartrant à base d'oxygène actif, spécialement conçu pour les générateurs d'hémodialyse et les circuits hydrauliques. Dialox™ est utilisé pour le détartrage et la désinfection des générateurs d'hémodialyse et de leurs circuits hydrauliques. Prêt à l'emploi, aucune activation du produit n'est nécessaire. Pour l'utilisation, merci de vous reporter aux recommandations du fabricant de votre générateur d'hémodialyse (par exemple 1/25 ou 1/35 à 20°C ou 37°C). Le processus de rinçage doit être contrôlé selon les instructions des fabricants du générateur d'hémodialyse et du circuit hydraulique, à l'aide de bandelettes tests peroxyde.

Composition du réactif

- 100 g contient les substances actives suivantes : 0,4% d'acide peracétique [CAS N° 79-21-0] 6,9% de peroxyde d'hydrogène [CAS N° 7722-84-1] 4,6% d'acide acétique [CAS N° 64-19-7] Couleur : incolore Densité : 1,03 g/cm³ à 20°C

Péremption

- 2 ANS

Mode d'emploi

- Le produit Dialox est prêt à l'emploi, il s'utilise en cycle de désinfection chimique des appareils de traitement d'eau appliqué à l'hémodialyse qui prélèvent et diluent automatiquement la quantité nécessaire de Dialox . Dialox est actif dès la dilution de 1/35, et pour un temps de contact de 10mn.

Précautions d'emploi

- Ne pas mélanger DIALOX avec d'autres produits.
- Ne pas remettre de DIALOX usagé dans un bidon .
- Porter gants et lunettes de protections lors des manipulations.
- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
- En cas de contact avec la peau, rincer à l'eau courante. DIALOX peut provoquer un blanchiment de l'épiderme qui disparaît en quelques heures.
- En cas d'ingestion consulter un spécialiste.
- DIALOX est biodégradable et son rejet à l'égout, dilué fortement, est sans danger .
- Conserver DIALOX sous abri entre 5°C et 30°C .
- Conserver hors de portée des enfants.

Référence : DIALOX 5 L

Conditionnement : 1 Carton de 4 Bidons