

Information sur les produits/services

TEST PERACETIQUE en bandelettes



Année 2024

Houque 31310 MONTESQUIEU VOLVESTRE

Tel: 06.69.19.22.07 Fax: 05.61.90.31.88

Mail: contact@danferr-medical.fr

Site: www.danferr-medical.fr



DiaQuant® Test Peracétique

Produit

DiaQuant® Test peracétique du laboratoire Macherey-Nagel (réf: 932 001)

Présentation

Boite hermétique avec pastille anti humidité, de 100 bandelettes analytiques.

Conditionnement

Boite unitaire

Applications

Produit avec marquage CE. Spécialement conçu pour la dialyse..
Permet de contrôler très rapidement, les résidus d'acide peracétique et de peroxyde d'hydrogène dans les solutions de rinçage, à la suite de désinfection, des matériels de traitement d'eau ou des dialyseurs, avant remise en service.

Péremption

2 ans (date de péremption indiquée sur l'emballage)

Mode d'emploi

- ◇ Plonger la languette test dans la solution à analyser pendant 1 secondes.
- ◇ Eliminer l'excédent de liquide en secouant la languette et attendre 5 secondes.
- ◇ Comparer la couleur de la zone de test avec l'échelle de lecture affichée sur l'emballage

Précautions d'emploi

- ◇ Reboucher immédiatement le tube après avoir prélevé la bandelette analytique.
- ◇ Conserver le tube hermétiquement fermé dans un endroit frais et sec entre 4 et 30 °C

Référence : TEST DIA PERA

Veillez nous contacter pour établir une étude de prix, pour un volume annuel séquencé.

* Frais de port et d'emballage en supplément.